

schülke -†



acryl-des® Gebrauchslösung

acryl-des® ist ein alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel auf Basis quarternärer Ammoniumverbindungen – erhältlich als Gebrauchslösung sowie als getränkte Desinfektionstücher.

Unser Plus

- gebrauchsfertig
- kurze Einwirkzeit
- VAH- und ÖGHMP- gelistet
- für alkoholempfindliche Flächen

Anwendungsgebiete

Zur Desinfektion von Medizinprodukten und von Flächen aller Art, z.B.

- Inhalatoren
- Inkubatoren
- Säuglingswannen
- Monitoren
- Kabeln
- Therapieliegen
- Kunststoffauflagen
- Ultraschallköpfen
- Solarien

Anwendungshinweise

acryl-des® unverdünnt auf Gegenstände, Oberflächen von Medizinprodukten sowie Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Speziell für Acryl-Flächen (Plexiglas) und andere empfindliche Kunststoff-Oberflächen sowie zur Wischdesinfektion für Ultraschallköpfe geeignet.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid	gebrauchsfertig	1 Min.
levurozid	gebrauchsfertig	60 Sek.

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV) <i>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie</i>	gebrauchsfertig	1 Min.
BVDV	gebrauchsfertig	1 Min.
Vaccinia Virus	gebrauchsfertig	1 Min.
Norovirus	gebrauchsfertig	15 Min.
Polyoma SV40 <i>- hohe Belastung</i>	gebrauchsfertig	1 Min.
Rotavirus	gebrauchsfertig	1 Min.

Listungen

- VAH-Liste
- ÖGHMP-Zertifikat



Produktdaten

100 g enthalten an wirksamen Bestandteilen:
0,26 g Quaternäre Ammoniumverbindungen,
Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride, 0,26 g
Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,26 g Quaternäre
Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]
dimethyl-, Chloride

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Form	flüssig
pH	6 - 8 / 20 °C / Konzentrat
Viskosität, dynamisch	nicht bestimmt

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets
Etikett und Produktinformationen lesen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
acryl-des 500 ml FL	20/Karton	165709

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Dosierpumpe für 500 ml / 1 L	180303
Sprühpumpe für 500 ml/1 l	180124

Verwandte Produkte

- acryl-des® Tücher Desinfektionstücher

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren
und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter
Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick aller zum Präparat acryl-des® vorliegenden
Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter
www.schuelke.com

Für Ihre individuellen Fragen:
Customer Care

Telefon: +49 (0)40 521 00-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis
nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com