



# DESIFOR-QUICK



## Flächendesinfektion • begrenzt viruzid

### Einsatzbereich

Zur rückstandsfreien Schnelldesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen im humanmedizinischen Bereich und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

### Anwendung

Zu desinfizierende, saubere Fläche vollständig benetzen und abtrocknen lassen. Einwirkzeit beachten.

### Technische Informationen

Karton mit 49 Pumpsprayfl. à 50 ml Art.-Nr. 00522  
 Karton mit 6 Fl. à 500 ml,  
 2 Sprühaufsätze Art.-Nr. 00521  
 Karton mit 12 Fl. à 1 Liter  
 2 Sprühaufsätze Art.-Nr. 20522  
 Kanister à 5 Liter Art.-Nr. 20451

### Wirkstoffe

100 g enthalten 63,1 g 2-Propanol, 2,9 g Ethanol.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS02, GHS07

BAuA Reg.-Nr. N-58211, N-58212

CHZN5689

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
 Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

| Anwendungsgebiet/Wirksamkeit   | Konzentration/Einwirkzeit    | Anmerkung  |
|--|------------------------------|--|
| Humanmedizinischer Bereich, bakterizid und levurozid                         | konz. 5 Min.                 | VAH, EN 13727, EN 13624, EN 16615 hohe und niedrige Belastung  |
| Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen, bakterizid und levurozid | konz. 1 Min.<br>konz. 1 Min. | EN 1276, EN 1650, EN 13697 hohe und niedrige Belastung<br>EN 1276, EN 1650, EN 16615 hohe und niedrige Belastung |
| Tuberkulozid (M. terrae)   | konz. 30 Sek.                | EN 14348 hohe und niedrige Belastung   |
| begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)                                       | konz. 15 Sek.                | EN 14476 niedrige Belastung  |
| Rotaviren  | konz. 30 Sek.                | EN 14476 ohne Belastung  |
| Noroviren (MNV)  | konz. 30 Sek.                | EN 14476 niedrige Belastung  |

### Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Haltbarkeit geschlossen: siehe Etikett
- Haltbarkeit geöffnet: 36 Monate
- Gebrauchsfertige Tücher (EN 16615, 4-Felder-Test)
- VAH-gelistet
- HACCP-konform

### Hinweis

Nicht anwenden auf alkoholempfindlichen Oberflächen. Flüssigkeiten und Dampf leicht entzündbar. Sicherheitsdatenblatt beachten.

pH conc 0 2 4 8 10 12 14

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0920

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
 Taunusstraße 19 · 80807 München  
 Tel. +49 89 3506080  
 info@dr-schnell.de  
 www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
 QUALITÄT UND SERVICE